

 Ritex GmbH · Gustav-Winkler-Str. 50
D-33699 Bielefeld · Germany
ritex@ritex.de www.ritex.de

Inhalt: 1 Kondom, transparent, glatte Oberfläche, zylindrisch, mit Reservoir, Breite (flachliegend) 53 mm, Gleitmittel Dimeticon.

 0297  0000-00
LOT 0000 EN ISO 4074
  

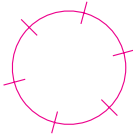

Achtung! Die Innenseite ist nicht veränderbar.

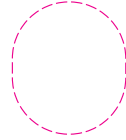

Gebrauchshinweise:

Siegelbriefchen behutsam an der Zackenkante aufreißen (1). Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können.



Kondom anlegen, bevor Penis und Körper des Partners sich berühren. Vorhaut ganz zurückziehen, Reservoir des Kondoms mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, mit Abrollrand nach außen auf die Eichel setzen und vollständig über den steifen Penis abrollen (2).



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens), ziehen Sie den Penis heraus. Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht (3).



Sollte das Kondom bei der Verwendung undicht werden oder reißen oder sollten Unverträglichkeiten auftreten, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.





Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren. Nicht vaginale Anwendung oder geringe Scheidenfeuchtigkeit gefährden die Sicherheit von Kondomen. Um mangelnde Gleitfähigkeit zu beheben, sollten zusätzlich kondomverträgliche Gleitmittel (wie z. B. Ritex GEL*, Ritex BIO Gleitgel) verwendet werden. Zusätzliche Gleitmittel jedoch erst bei angelegtem Kondom auftragen.







Nie öl- oder fetthaltige Gleitmittel (wie z. B. Vaseline, Baby-Öl, Körperlotion) verwenden, sondern solche, die vom Hersteller für die Anwendung mit Kondomen empfohlen sind. Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. an Vagina oder Penis fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen.

Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Stand April 2015

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

-  Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchshinweise.
-  Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.
-  Nicht benutzen, wenn das Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondom entsorgen und ein neues verwenden.
-  Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.

-  Kondome trocken lagern.
-  Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann.
-  Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.
-  Nummer der Kondomcharge
-  Ritex Artikelnummer
-  Hersteller

